



Vorbereitung

Gründlich die Hände waschen.
Bequeme Position finden.

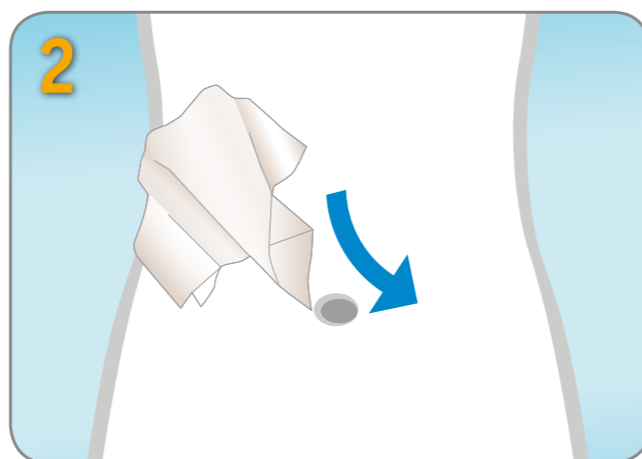

Reinigung / Desinfektion

Reinigen bzw. desinfizieren Sie
den Pouch-Eingang

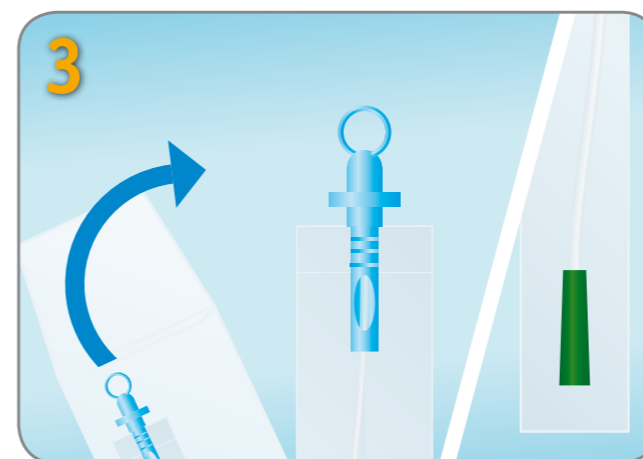

Vorbereitung Einzelkatheter

Katheter aus Verpackung nehmen.
Öffnen der Innenverpackung des
Katheters am unteren Ende, um
Urinfluss zu gewährleisten.




Vorbereitung System

Umverpackung am oberen Ende
aufreißen, wasserfeste Unterlage
entnehmen.




Vorbereitung Katheterisierung

Schutzkappe entfernen, Katheter
an der Griffmulde festhalten.
Achtung: Katheterspitze sollte zu
diesem Zeitpunkt nicht aus der
Vorlaufspitze austreten.

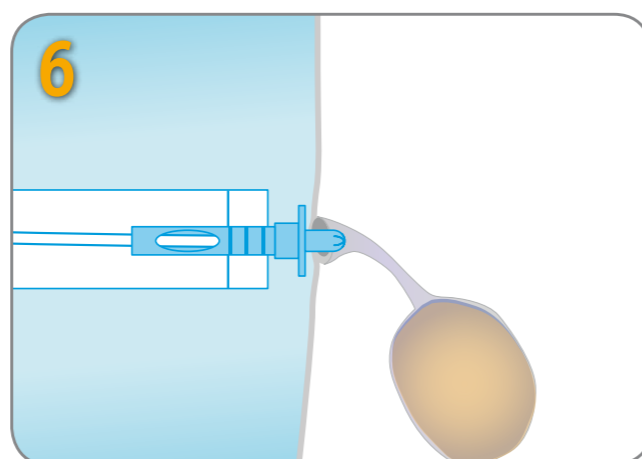


Beginn Katheterisierung

Schieben Sie die Vorlaufspitze so
weit vor, bis der Teller die Pouch-
Öffnung erreicht hat.

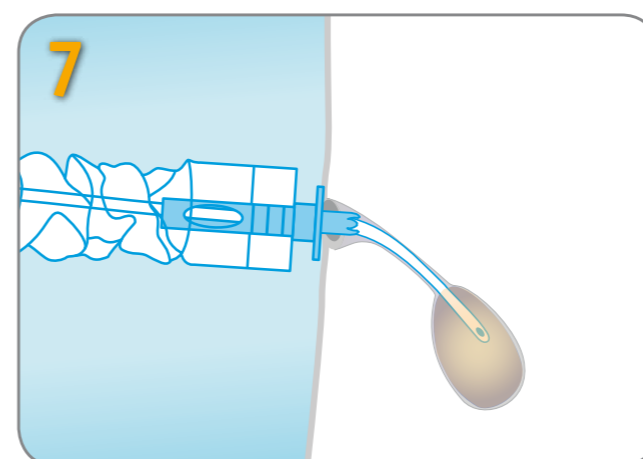

Katheterisierungsvorgang

Wenn der Urin fließt, schieben Sie
den Katheter noch ein wenig.
Katheter in dieser Position belas-
sen, bis kein Urin mehr fließt.

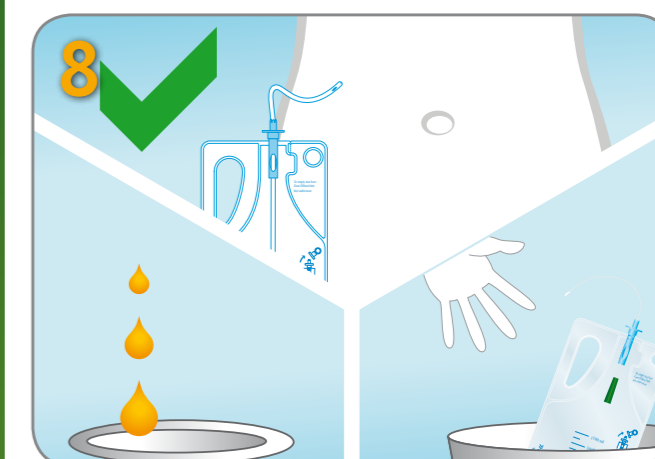

Katheter entfernen

Katheter vorsichtig entfernen.
Entsorgen aller Materialien im
Hausmüll. Hände waschen.